

COVID 19 Antigen Test **SPUCKTEST - für Zuhause**

Ab SOFORT erhältlich

Tel.: 01 2719472

Email: office@floridus-apotheke.at

Web: www.floridus-apotheke.at

HBM CORONAVIRUS ANTIGEN SCHNELLTEST - **SPUCKTEST**

- **In der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, der Antigen tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2.**
- **WHO Listing – für Diagnostische SARS-COV-2 Tests**
- Einzel abgepackte Pufferlösungen
- Testergebnis innerhalb von 15 Minuten
- **Kein Rachen und Nasenabstrich nötig**
- 18 Monate Haltbarkeit

Klinische Performance:


Sensitivität: 95%

Spezifität: 100%

Zertifikate




**Preis: ab 1 Stück -> €14,90,-
ab 10 Stück -> € 9,90,-**

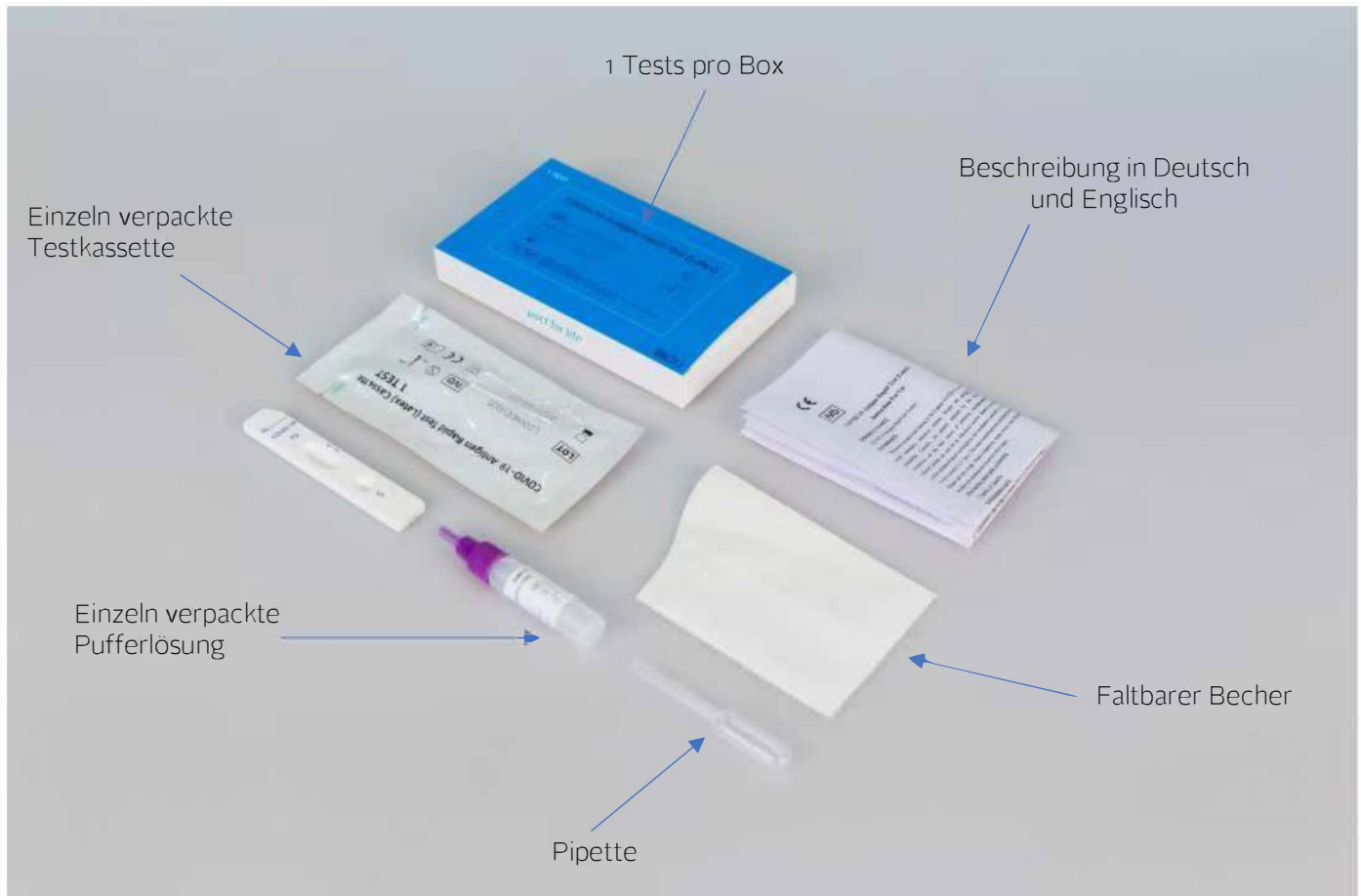

1. COVID 19 Antigen Test


HBM CORONAVIRUS ANTIGEN SCHNELLTEST - **SPUCKTEST**

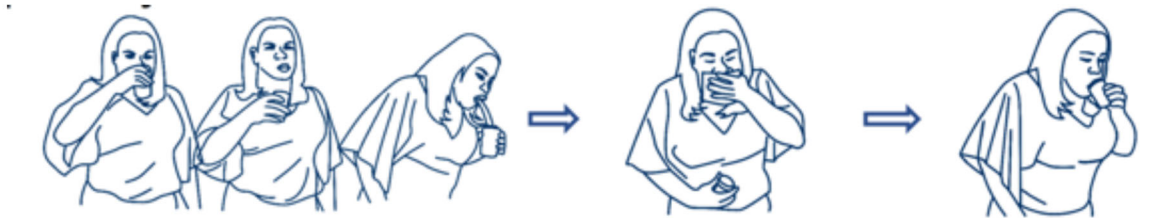

1. Spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und spucken Sie die Flüssigkeit aus. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass keine Mundbakterien im Speichel gesammelt werden.

2. Husten Sie tief und machen Sie "Lärm" um Speichel tief aus der Kehle zu bekommen.

3. Sobald Sie genug Speichel gesammelt haben, spucken Sie diesen in den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang 3-4 mal um genügend Probe zu erhalten.

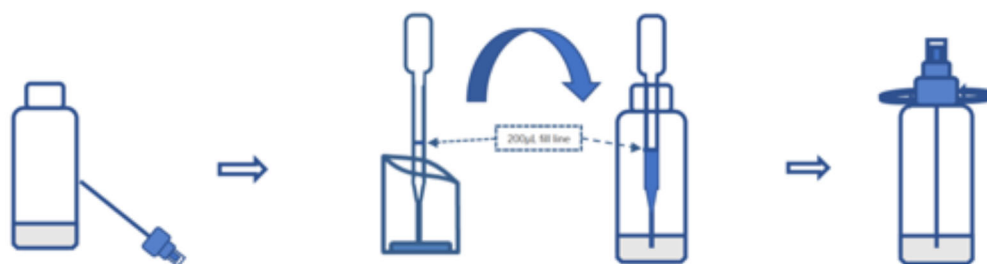


4. Öffnen Sie das Extraktionsrohr

5. Übertragen Sie 200 µl frischen Speichel mit der Pipette in das Extraktionsrohr..

6. Schließen Sie das Extraktionsrohr.

1. COVID 19 Antigen Test


HBM CORONAVIRUS ANTIGEN SCHNELLTEST - **SPUCKTEST**

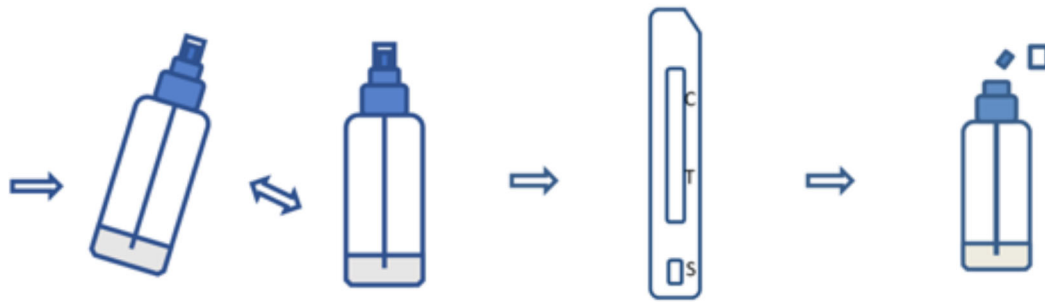

7. Schütteln und vermengen Sie den Speichel mit der Pufferlösung ca. 15 Sekunden

8. Nehmen Sie die Testkassette aus der Verpackung

9. Öffnen Sie das Extraktionsrohr an der Oberseite

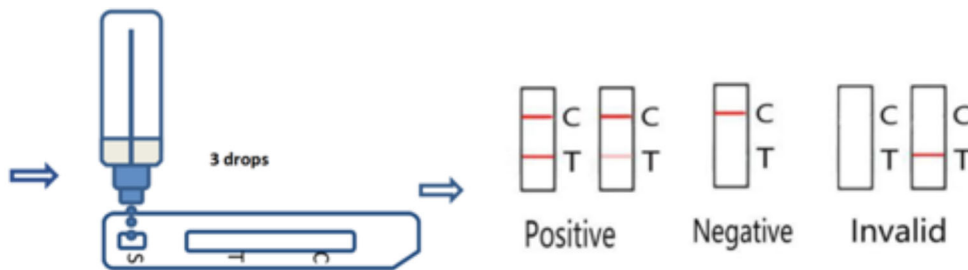

10. Tropfen Sie 3 Tröpfchen der Flüssigkeit in die Testkassette.

11. Nach 15 Minuten können Sie das Testergebnis ablesen. Nach ca. 30 Minuten kann das Testergebnis ungültig werden.